

CONFIANZA EN ESPACIOS LIMITADOS

STRAUMANN® NARROW NECK CrossFit®



NUEVO IMPLANTE SOFT TISSUE LEVEL DE **DIÁMETRO ESTRECHO** CON UNA PLATAFORMA PROSTODÓNTICA ESTRECHA Y UNA **ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA**

UN ESPACIO LIMITADO – UN RETO EN LA PRÁCTICA DIARIA

Espacios interdentes estrechos


- Espacios de un solo diente con espacio muy limitado
- Ejemplo clínico: Sustitución de un incisivo lateral en el maxilar superior



Por cortesía del Dr. Rocuzzo

Disponibilidad limitada de hueso y crestas óseas estrechas

- Casos parcial o completamente edéntulos con hueso atrofiado
- Pacientes que prefieren no someterse a un aumento óseo
- Ejemplo clínico:
 - Pérdida de incisivos centrales o laterales en la mandíbula
 - Paciente desdentado durante mucho tiempo con una anchura de cresta estrecha

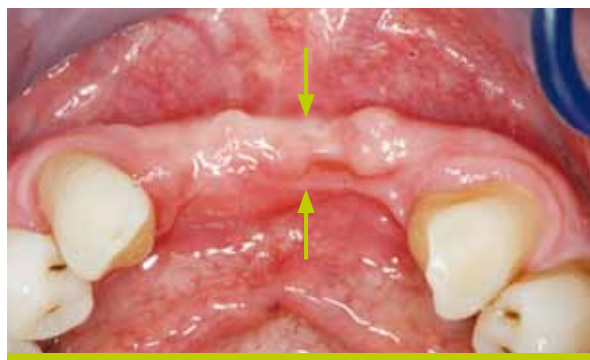

Por cortesía del Dr. Fragola

APLICACIONES

El sistema de implantes Straumann® Narrow Neck CrossFit® Standard Plus se puede colocar en la región anterior y premolar para realizar cualquier tipo de restauración. No es necesaria una ferulización con otros implantes.





2. GRAN VARIEDAD DE OPCIONES DE TRATAMIENTO

Múltiples opciones prostodónticas por su plataforma prostodóntica estrecha de 3,5 mm con conexión interna

1. CONFIANZA AL COLOCAR IMPLANTES DE DIÁMETRO ESTRECHO

- Material Roxolid®
- Superficie SLActive®




3. SIMPLICIDAD EN EL USO DIARIO

- Manejo de los tejidos blandos gracias al cuello pulido integrado
- Conexión CrossFit® autoguiada al nivel de los tejidos blandos
- Nuevo elemento de transferencia con conexión de encaje a presión "snap-fit" al implante

1. CONFIANZA AL COLOCAR IMPLANTES DE DIÁMETRO ESTRECHO

Gracias a la resistencia del material Roxolid® fue posible diseñar un implante con una plataforma prostodóntica estrecha y con conexión interna, consiguiendo también un alto grado de resistencia mecánica (230 N*).

- Straumann® Narrow Neck CrossFit®, 3,3 mm Roxolid® y pilar de titanio Straumann®
- Straumann® Bone Level NC, 3,3 mm Roxolid® y pilar anatómico Straumann®

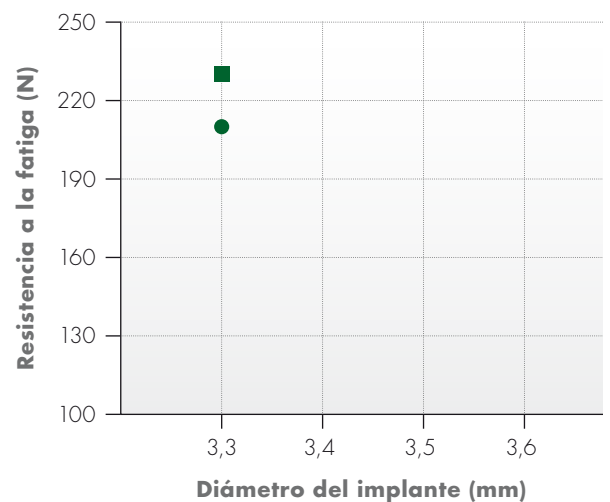




*Resistencia a la fatiga según ensayos internos de acuerdo con la norma ISO 14801, datos en archivo [B679A/B567A]

2. GRAN VARIEDAD DE OPCIONES DE TRATAMIENTO

El sistema de implantes Narrow Neck CrossFit® Standard Plus de Straumann® brinda una amplia gama de opciones de tratamiento:

- Soluciones para dientes unitarios y arcadas parcial y totalmente edéntulas
- Restauraciones atornilladas y cementadas
- Compatible con el flujo de trabajo de toma de impresión al nivel del implante y al nivel del pilar

	Atornilladas	Cementadas			
 Dientes unitarios	 Pilar de oro NNC, corona	 Pilar macizo NNC	 Pilar cementable NNC, recto	 Pilar cementable NNC, angulado	 Pilar de oro NNC, corona
 Parcialmente desdentado	 Pilar de oro NNC, puente	 Pilar macizo NNC	 Pilar cementable NNC, recto	 Pilar cementable NNC, angulado	 Pilar de oro NNC, corona

	Sobredentaduras fijas	Sobredentaduras removibles	
 Desdentado	 Pilar de oro NNC, puente para restauraciones atornilladas	 LOCATOR®	 Pilar de oro NNC, corona para restauración telescópica

3. SIMPLICIDAD EN EL USO DIARIO

El sistema de implantes Narrow Neck CrossFit® Standard Plus de Straumann® es un implante Soft Tissue Level diseñado para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia en su clínica.



Por cortesía del Dr. Rocuzzo

LOCATOR® es una marca registrada de Zest Anchors, Inc., EE.UU.

© Institut Straumann AG, 2012. Todos los derechos reservados.

Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.