



**INSTRUCCIONES DE
TRATAMIENTO POSTERIOR**
STRAUMANN® EMDOGAIN



Información para el paciente

SIMPLY DOING MORE

NORMAS A SEGUIR TRAS LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Después del tratamiento con Straumann® Emdogain, en el organismo tienen lugar diferentes procesos que deben transcurrir de la mejor forma posible. Durante el tiempo de cicatrización, es necesario observar algunas normas generales.

Los primeros días después de la intervención quirúrgica **no deben cepillarse** los dientes de la zona operada, a fin de no entorpecer la cicatrización.



Las siguientes instrucciones le servirán de guía durante las primeras semanas tras el tratamiento.

SEMANA 1

- Utilizar varias veces al día un colutorio contra las bacterias
- Evitar el alcohol, la nicotina, el café, el té negro y los productos lácteos frescos
- No masticar con la zona tratada
- Evitar los alimentos duros y consistentes
- No cepillarse las zonas tratadas

SEMANAS 2-6

- Realizar enjuagues con un colutorio contra las bacterias
- Retirada de la sutura por el odontólogo responsable
- Acudir para realizar una limpieza dental profesional
- Cuidado adicional de los espacios interdenciales

A PARTIR DE LA SEMANA 6

- Acudir para realizar una limpieza dental profesional
 - Cepillar cuidadosamente los dientes de la zona tratada, inclusive los espacios interdenciales
-

La evolución en las primeras semanas tras el tratamiento puede transcurrir de forma diferente, en función de las condiciones individuales de cada paciente. Por este motivo el paciente debe informarse a través de su odontólogo sobre las medidas postoperatorias a seguir y respetarlas escrupulosamente. El odontólogo responsable establecerá individualmente unas visitas de control periódicas.

Una vez efectuado el tratamiento regenerativo se recomienda llevar a cabo una higiene oral consecuente y acudir a los controles periódicos que establezca su odontólogo.

© Institut Straumann AG, 2011. Reservados todos los derechos.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados
son marcas o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
Reservados todos los derechos.

Sus próximas citas

L	M	X	J	V	Fecha	Hora
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

Sello de la clínica